

Reinigung und Desinfektion entsprechend den Richtlinien zur "Hygienischen Aufbereitung von medizinischen Homecare Produkten", EUROM VI WG 2

Absaugpumpe 7305 VacuAide

1. Hinweis nach Anhang 1 der Medizingeräte Verordnung 93/42/EWG

- a. Das Produkt kann wieder verwendet werden.
- b. Das Produkt ist als unkritisch einzustufen.
- c. Transport kann durch normalen Güterverkehr erfolgen.
- d. Lagerung muss unter folgenden Eigenschaften erfolgen:
 - - 40°C bis + 70°C
 - 0 -95 % relative Luftfeuchtigkeit

2. Transport und Lagerung

- a. Stellen Sie sicher, dass eine verunreinigte Absaugpumpe separiert wird um eine Kontamination von Neugeräten im Transportfahrzeug, Lager oder in der Werkstatt zu verhindern.
- b. Es wird empfohlen eine verunreinigte Absaugpumpe in einem großen verschließbaren Plastikbeutel zu lagern oder zu transportieren.
- c. Es wird empfohlen eine verunreinigte Absaugpumpe nur mit Einmal-Handschuhen zu bearbeiten.

3. Reinigung und Desinfektion

Vorbereitung: Halten Sie die folgenden Dinge bereit:

- Einmal-Handschuhe
- Staubmaske
- Milde Seifenlauge zur Reinigung
- Fusselfreies Tuch
- Desinfektionslösung (angesetzt nach den Vorgaben des Herstellers z.B. Microbac forte[®] von Bode Chemie Hamburg)
- geeignetes Tuch oder Medium zum Auftragen der Desinfektionslösung

- a. Ziehen Sie Einmal-Handschuhe an.
- b. Vor der Reinigung der Absaugpumpe immer den Netzstecker ziehen.
- c. Entfernen Sie die Verpackung und entsorgen Sie diese.
- d. Entfernen Sie den Bakterienfilter, Gummiwinkel, Silikon-Verbindungsschlauch und den Sekretbehälter und entsorgen Sie diesen nach den geltenden Vorgaben.
- e. Verschließen Sie die entstandene Öffnung z.B. mit einem Stück Tuch, so dass dieses später wieder herausgenommen werden kann.

4. Reinigung

- a. Reinigen Sie alle äußeren Teil des Gehäuses mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie ein nur leicht feuchtes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnung des Gehäuses eindringt.
- b. Achten Sie besonders darauf das keine Feuchtigkeit in den Einschalter eindringt.
- c. Entfernen Sie überflüssige Feuchtigkeit mit einem fusselfreien Tuch.

5. Desinfektion

- a. Bringen Sie das Desinfektionsmittel auf das Gehäuse auf und achten Sie auf die Einwirkzeit des benutzen Desinfektionsmittels. Beachten Sie die Herstellerhinweise des jeweiligen benutzten Desinfektionsmittels. Lassen Sie das Gerät gut trocknen bevor Sie weitere Arbeitsschritte einleiten.
- b. Vervollständigen Sie die Absaugpumpe mit den nötigen Teilen: Bedienungsanleitung, Sekretbehälter, Bakterienfilter, Silikonschlauch und Winkel (Wiedereinsatz-Kit 7305D-603 ohne Bedienungsanleitung).

6. Fertig für den Wiedereinsatz

- a. Verpacken Sie die Absaugpumpe in einen schützenden Plastikbeutel für den Versand oder entsprechende Lagerung.
- b. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nicht mit anderen verunreinigten Geräten in Kontakt kommt.